

Aplikace GN Hearing – uživatelská příručka

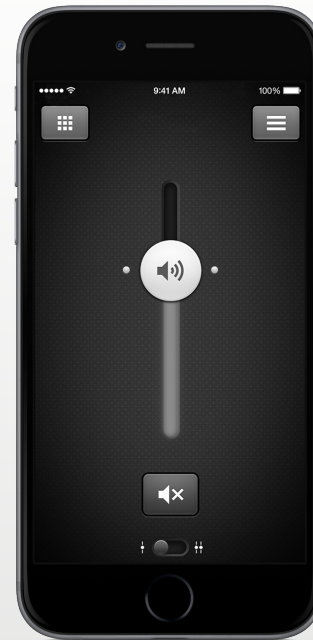

Úvod

Blahopřejeme ke stažení aplikace. Tato aplikace slouží ke zlepšení vašeho poslechu a k dokonalejšímu využití vašich sluchových pomůcek.

Díky naší inovativní zvukové technologii a designu kombinovanému s přizpůsobeným naprogramováním zařízení vaším foniatrem bude poslech příjemnější zkušeností.


Aplikace vám umožní dokonalejší využití sluchových pomůcek poskytnutím nových způsobů ovládání, přizpůsobení a podpory.

Jestliže požadujete tištěnou verzi uživatelské příručky k aplikaci, kontaktujte zákaznickou podporu nebo si tuto příručku jednoduše vytiskněte.

Vyhledání a instalace aplikace




Aplikace pro zařízení iPhone, iPad a iPod touch získáte na webu Apple App Store provedením následujících kroků:

1. Klepnutím na ikonu App Store  v zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch vstupte do obchodu App Store.
2. V obchodě App Store vyhledejte „GN Hearing“ a název aplikace.
3. Pokud používáte iPad, změňte kritéria vyhledávání v levém horním rohu na „iPhone only“ (pouze iPhone).
4. Po nalezení aplikace klepněte na „Get“ (získat).
5. Potom klepněte na „Install“ (nainstalovat).
6. Zadejte platné Apple ID a heslo.
7. Po zadání hesla se aplikace GN Hearing stáhne a nainstaluje.
8. Po stažení aplikaci naleznete na obrazovce mobilního zařízení – klepnutím aplikaci spustíte.



Aplikace pro zařízení Android získáte stáhnutím z obchodu Play a provedením následujících kroků:

1. Klepnutím na ikonu Obchod Play v telefonu Android v  stupte do obchodu Play.
2. V obchodě Play vyhledejte „GN Hearing“ a název aplikace.
3. Po nalezení aplikace klepněte na tlačítko „Instalovat“ a potom na tlačítko „Přijmout“ pro povolení přístupu aplikace k některým funkcím ve vašem telefonu, např. k funkci Bluetooth.
4. Po zadání hesla se aplikace GN Hearing stáhne a nainstaluje.
5. Po dokončení instalace aplikaci spustíte klepnutím na tlačítko „Otevřít“.

Požadovaná zařízení

Aplikace přibližuje základní ovládací prvky a další pokročilé funkce na dosah ruky, abyste si mohli poslech přizpůsobit podle vlastních potřeb.

Chcete-li aplikaci používat, budete potřebovat následující zařízení:

Mobilní zařízení iOS

1. Sluchové pomůcky využívající technologii Made for iPhone nebo Bluetooth Smart¹
2. Mobilní zařízení: iPhone, iPad nebo iPod touch se systémem iOS 8 nebo novějším.

Aplikace podporuje hodinky Apple Watch. Podpora hodinek Apple Watch vyžaduje operační systém watchOS 2 a iOS 9.


Mobilní zařízení Android

1. Sluchové pomůcky využívající technologii Made for iPhone nebo Bluetooth Smart¹
2. Aplikace je kompatibilní s podporovanými mobilními zařízeními Android² a operačním systémem OS 4.4.2 KitKat nebo novějším.


¹ Ujistěte se, zda je firmware sluchových pomůček aktualizován na nejnovější verzi. O aktualizaci firmwaru sluchových pomůček můžete požádat také svého foniatra.

² Seznam kompatibilních zařízení se systémem Android naleznete na webových stránkách k aplikaci: www.userguides.gnhearing.com

Funkce aplikace

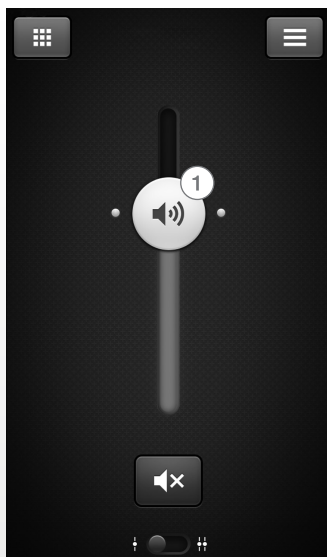

1. Nastavování úrovně hlasitosti nebo ztišení jednotlivých sluchových pomůcek

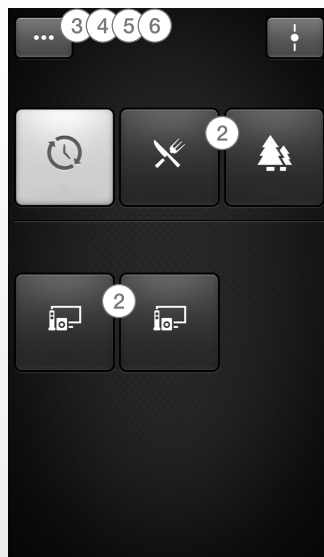

2. Změna manuálních a streamerových programů


3. Nastavení **výšek a basů** vašich předvoleb

4. Vytváření **oblíbených** položek k uložení upřednostňovaných programů a nastavení Přidružování oblíbených položek ke konkrétním místům

5. Využijte funkci **Sound enhancer** pro rozšířené nastavení funkcí: Komfort v hlučném prostředí, zaostření hovoru a komfort ve větrném prostředí*

6. Použijte funkci **Tinnitus manager** (správa tinnitu) k úpravě intenzity a kolísání zvuku generátoru k potlačení projevů tinnitu**
Využijte funkci Tinnitus manager (správa tinnitu) k volbě upřednostňovaného zvuku Nature Sound™**

*K dispozici pro sluchové pomůcky v nejvyšších cenových bodech: 8, 9, 17
**K dispozici, pokud byl ve vašich sluchových pomůčkách aktivován generátor k potlačení projevů tinnitu.

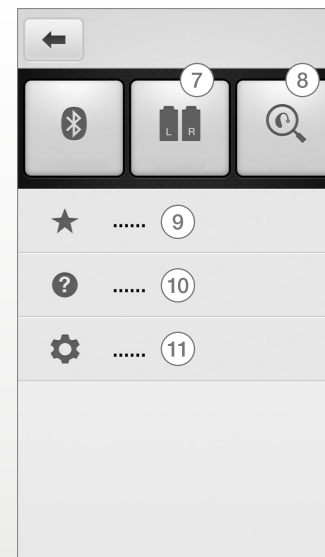

7. Zobrazení stavu baterie a připojení

8. **Vyhledávač:** Pomůže najít ztracené nebo odložené sluchové pomůcky

9 **Oblíbené položky:** Zobrazení přehledu a úpravy či odstranění uložených oblíbených položek

10. **Výukový program:** Výukový program vás provede funkcemi aplikace

11. **Nastavení:** Úpravy a přizpůsobení názvů programů, odstranění všech oblíbených položek, spuštění či ukončení režimu demo a zobrazení informací o aplikaci

Varování a bezpečnostní opatření

Používání aplikací v mobilních zařízeních:

Nedeaktivujte upozornění na aktualizace aplikací. Uživatelům doporučujeme, aby nainstalováním všech aktualizací zajistili správnou funkci aplikace se zachováním její aktuálnosti.

Aplikace musí být použity pouze se sluchovými pomůckami, pro něž jsou určeny, dle popisu v uživatelské příručce.

Společnost GN Hearing nenese žádnou odpovědnost za používání aplikací jinými zařízeními.

Varování a upozornění

Při používání aplikace se sluchovou pomůckou se ujistěte, zda jste si přečetli uživatelskou příručku ke sluchové pomůcce. Uživatelská příručka ke sluchové pomůcce je součástí balení. Pokud potřebujete novou kopii, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti GN Hearing.

Zvláštní pozornost věnujte informacím označeným varovným symbolem



VAROVÁNÍ označuje situace, jež mohou vést k vážným zraněním,
UPOZORNĚNÍ označuje situace, jež mohou vést k drobnějším
a středně těžkým zraněním.

Zamýšlený účel aplikací pro chytré telefony:

Aplikace slouží k použití se sluchovými pomůckami k ovládání jejich funkcí, zprostředkování koncovým uživatelům dodatečných možností nastavení parametrů poslechu a zajištění dalších důležitých funkcí.

Aplikace GN Hearing propojená s mobilním zařízením je určena k využití s bezdrátovými sluchovými pomůckami Bluetooth Smart. Aplikace GN Hearing pro mobilní zařízení odesílají a přijímají signály z bezdrátových sluchových pomůček Bluetooth Smart prostřednictvím mobilních zařízení, pro něž byly vyvinuty.



0297

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dánsko

Veškeré záležitosti týkající se směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích adresujte společnosti GN Hearing A/S.

GN Hearing

Celosvětové ústředí

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dánsko
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

DIČ: 55082715

Spojené království

GN Hearing
Kirtlington Business Centre
Portway
Kirtlington
Oxon OX5 3JA
Tel.: +44 1869 352 800
Fax: +44 1869 343 466
www.gnresound.co.uk

Austrálie

GN Hearing
Gate C, 19-25 Khartoum Rd
Macquarie Technology Park
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: (zdarma) 1800 658 955
www.gnresound.com.au

Nový Zéland

GN Hearing
Ground Floor, North Entrance
4 Fred Thomas Drive
Takapuna
Auckland, 0622
Tel.: (zdarma) 0800 900 126
Fax: (zdarma) 0800 007 695
www.gnresound.co.nz

Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. Android a Google Play jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth ® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Samsung, Galaxy a Galaxy S5 jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics.