

Aplicación GN Hearing

- guía del usuario

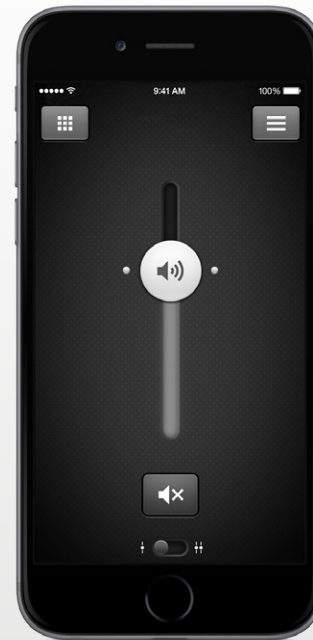

Introducción

La aplicación está diseñada para mejorar su experiencia auditiva y aprovechar más sus audífonos.

Nuestra innovadora tecnología de sonido y su diseño, combinados con una programación personalizada por su audioprotesista, harán que la audición sea una experiencia más agradable.

La aplicación le permite aprovechar más sus audífonos, proporcionando nuevas formas de control, personalización y alivio.

Si desea una versión impresa de la guía del usuario de esta aplicación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o imprímala.

Obtener e instalar la aplicación




Aplicaciones de acceso para iPhone, iPad y iPod touch: descargar desde App Store de Apple siguiendo estos pasos:

1. Entre en App Store pulsando el icono de App Store  en un iPhone, iPad o iPod touch
2. Busque “ GN Hearing ” y el nombre aplicación en App Store
3. Si tiene un iPad, cambie los criterios de búsqueda en la esquina superior izquierda a "iPhone only"
4. Después de encontrar la aplicación, pulse "Get"
5. A continuación pulse "Install"
6. Introduzca un ID y una contraseña de Apple
7. Después de introducir la contraseña, la aplicación GN Hearing se descargará e instalará
8. Después de la descarga, encontrará la aplicación en la pantalla del dispositivo móvil. Toque para abrir la aplicación



Aplicaciones de acceso para dispositivos Android: descargar desde Google Play siguiendo estos pasos:

1. Entre en Play Store pulsando el icono de Play Store  en su teléfono Android.
2. En Google Play, busque “GN Hearing” y el nombre de la aplicación
3. Después de encontrar la aplicación, pulse "Instalar" y, a continuación, "Aceptar" para permitir que la aplicación acceda a ciertas características de su teléfono, como Bluetooth
4. Después de introducir la contraseña la aplicación GN Hearing se descargará e instalará
5. Cuando finalice la instalación, pulse "Abrir" para abrir la aplicación

Dispositivos necesarios

La aplicación pone a su alcance controles básicos y funciones más avanzadas para personalizar su experiencia auditiva.

Para usar la aplicación necesita los siguientes dispositivos:

Dispositivo móvil iOS

1. Audífonos con tecnología para iPhone o Bluetooth Smart¹
2. Dispositivo móvil: iPhone, iPad y iPod touch con iOS 8 o posterior.

La aplicación es compatible con Apple Watch. El soporte para el reloj requiere watchOS 2 y iOS 9.


Dispositivo móvil Android

1. Audífonos con tecnología para iPhone o Bluetooth Smart¹
2. La aplicación es compatible con determinados dispositivos móviles Android 2 con SO 4.4.2 KitKat o posterior

¹ Asegúrese de que los audífonos están actualizados a la última versión del firmware. Su audioprotesista puede actualizar el firmware del audífono.

² Consulte la página web de la aplicación para obtener una lista de los dispositivos Android compatibles www.userguides.gnhearing.com

Funcionalidad de la aplicación

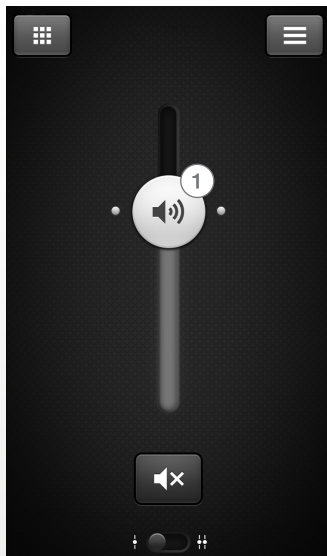

1. Ajustar y silenciar el volumen de ambos audífonos o de cada audífono individualmente



2. Cambiar los programas manuales **y del transmisor**

3. Ajustar **graves y agudos** según sus preferencias

4. Crear y **guardar** Favoritos programas y configuraciones preferidas
Asociar a un Favorito una ubicación específica


5. Use **el potenciador** de sonido para realizar ajustes de funciones avanzadas. Comodidad en situaciones ruidosas, enfoque en el habla y comodidad con viento*

6. Use **Tinnitus manager** para ajustar el tono y la variación de sonido del generador de sonido para tinnitus**


Utilice Tinnitus manager para elegir su Nature Sound™** preferido

*Disponible para audífonos Bluetooth inteligentes en los niveles de precios superiores: 8,9,17

**Disponible si el generador de sonido para tinnitus se ha activado en sus audífonos.

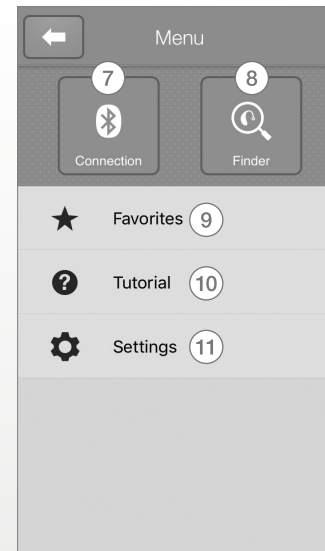

7. **Conexión:** Consulte el estado de conexión y la advertencia de pila baja.

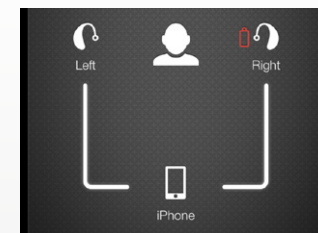

8. **Buscador:** Ayuda para localizar audífonos perdidos o extraviados

9. **Favoritos:** Ver un resumen y editar o eliminar Favoritos guardados

10. **Tutorial:** La aplicación Tutorial incorporada le guiará a través de las características de la aplicación

11. **Configuración:** Editar y personalizar los nombres de programas, borrar todos los favoritos, entrar y salir del modo de demostración y ver información básica acerca de la aplicación

Advertencias y precauciones

Uso con aplicaciones de dispositivos móviles:

Las notificaciones de las actualizaciones de las aplicaciones no deben desactivarse y se recomienda que el usuario instale todas las actualizaciones para asegurarse de que la aplicación funcione correctamente y se mantenga al día.

La aplicación sólo debe utilizarse con los audífonos para los que está diseñada según se describe en la guía del usuario de los audífonos.

GN ReSound no se hace responsable si se utiliza la aplicación con otros dispositivos.

Advertencias y precauciones

Si utiliza la aplicación con los audífonos, lea la guía de usuario de los audífonos. La guía de usuario se incluye en el paquete de los audífonos. Si necesita una copia nueva, consulte al servicio de atención al cliente de GN Hearing.

Preste atención a la información que contenga un símbolo de advertencia



ADVERTENCIA indica una situación que podría dar lugar a lesiones graves,

PRECAUCIÓN indica una situación que podría dar lugar a lesiones leves y moderadas.

Uso previsto de las aplicaciones de teléfonos smartphone:

Las aplicaciones están destinadas para controlar las funciones auditivas de los audífonos y proporcionar al usuario final opciones adicionales para ajustar los parámetros auditivos y ofrecer características adicionales y útiles.

La aplicación de dispositivos móviles GN Hearing está diseñada para audífonos Bluetooth inteligentes inalámbricos. La aplicación GN Hearing para dispositivos móviles envía y recibe señales de los audífonos inalámbricos



Bluetooth Smart a través de los dispositivos móviles para los que se desarrolló.

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca

Cualquier asunto relacionado con la Directiva 93/42/EEC de productos sanitarios debe dirigirse a GN Hearing A/S

GN Hearing

Fabricante

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

CVR no. 55082715

© 2015, 2016 GN Hearing A/S. Reservados todos los derechos. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Apple Watch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. La marca Bluetooth y su logotipo son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Samsung, Galaxy y Galaxy S5 son marcas comerciales de Samsung Electronics Co. Ltd.