

App GN Hearing

- manuale d'uso

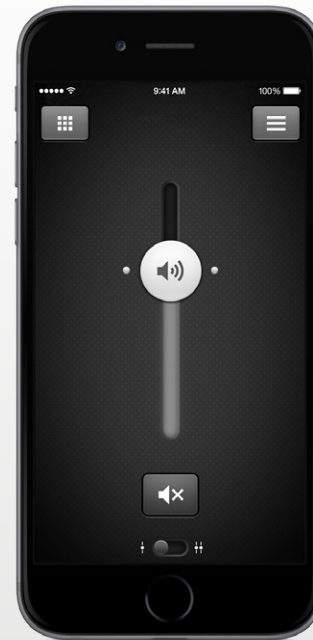

Introduzione

L'app vi aiuterà a migliorare la vostra esperienza acustica e ad ottenere di più dai vostri apparecchi acustici.

La nostra innovativa progettazione e tecnologia acustica, combinata con la programmazione personalizzata selezionata dal vostro audioprotesista, farà dell'ascolto un'esperienza più godibile.


Grazie all'app, che offre nuove modalità di controllo, personalizzazione e comfort, potrete sfruttare al meglio i vostri apparecchi acustici.

Se desiderate una versione cartacea del manuale utente di questa applicazione, contattate l'assistenza clienti o stampate questo manuale.

Come trovare e installare le app




Accedere alle app per iPhone, iPad e iPod touch – scaricare le app dall' Apple App Store seguendo questi step:

1. Accedete all'App Store toccando la relativa icona  su un iPhone, iPad o iPod touch
2. Nell'App Store, cercate " GN Hearing " e il nome dell'app
3. Se utilizzate iPad, cambiate i criteri di ricerca nell'angolo in alto a sinistra in: "solo iPhone"
4. Una volta trovata l'app, toccate "Scarica"
5. Quindi "Installa"
6. Inserite un'ID Apple e una password validi
7. Dopo aver inserito la password, potrete scaricare e installare l'app GN Hearing
8. Una volta terminato il download, l'app comparirà sullo schermo del dispositivo mobile - toccate per aprirla



Accedere alle app per dispositivi Android – scaricarle da Google Play seguendo questi step:

1. Accedete a Play Store toccando l'icona Play Store  sul vostro smartphone Android.
2. In Google Play, cercate "GN Hearing" e il nome dell'app
3. Una volta trovata l'app, toccate "Installa" quindi "Accetta" per permettere alla app di accedere a d alcune funzionalità del vostro telefono, come Bluetooth
4. Dopo aver inserito la password, potrete scaricare e installare l'app GN Hearing
5. Una volta completata l'installazione, toccare "Apri" per aprire l'app

Dispositivi necessari

L'app vi offre funzioni di telecomando di base e altre funzionalità avanzate che vi consentono di personalizzare la vostra esperienza d'ascolto.

L'applicazione richiede i seguenti dispositivi:

dispositivo mobile iOS

1. Apparecchi acustici che utilizzano la tecnologia Made for iPhone o Bluetooth Smart¹
2. Dispositivo mobile: iPhone, iPad o iPod touch con sistema operativo iOS 8 o versione successiva.

L'app supporta Apple Watch. Il supporto ad Apple Watch richiede watchOS 2 e iOS 9.

Dispositivo mobile Android


1. Apparecchi acustici che utilizzano la tecnologia Made for iPhone o Bluetooth Smart¹

L'app è compatibile con i dispositivi mobili Android supportati², dotati di sistema operativo OS 4.4.2 KitKat o versione superiore

¹ Verificare che il firmware degli apparecchi acustici sia stato aggiornato. Altrimenti, potete chiedere al vostro audioprotesista di aggiornare il firmware dell'apparecchio acustico.

² Consultare la pagina web dedicata all'app per un elenco dei dispositivi Android compatibili www.userguides.gnhearing.com

Funzionalità dell'app

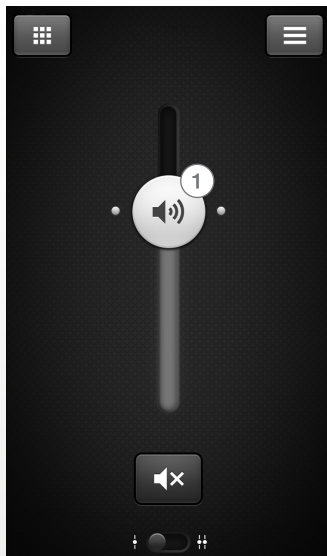

1. Regolare e disattivare il volume in entrambi gli apparecchi acustici, o in ciascun apparecchio acustico separatamente



2. Cambio dei programmi manuali e del gestore di flusso

3. **Regolazione dei bassi** e degli acuti secondo le proprie preferenze

4. Creazione di **Preferiti** per salvare i programmi e le impostazioni preferite
Possibilità di associare i programmi e le impostazioni preferite a una località particolare


5. Possibilità di utilizzare **Sound enhancer** per la regolazione avanzata delle funzioni: Comfort nel rumore, Speech Focus e Comfort all'aperto

6. Usa **Tinnitus manager** per regolare l'altezza del tono e la variazione del suono tramite il Generatore di suoni per acufeni**


Usa Tinnitus manager per scegliere il tuo Suono della Natura™** preferito

*Disponibile per gli apparecchi acustici Bluetooth Smart nelle fasce di prezzo più alte: 8,9,17

**Disponibile se il Generatore di Suoni per Acufeni è stato abilitato negli apparecchi acustici.

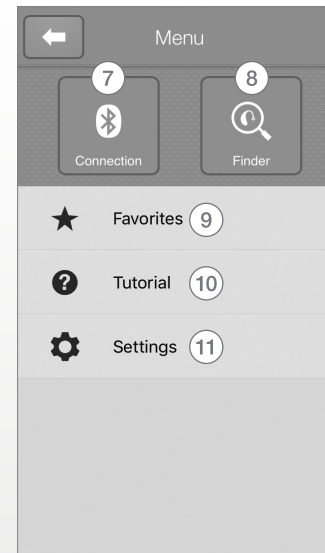

7. **Connessione:** Vedere lo stato della connessione e l'avviso di batteria scarica.

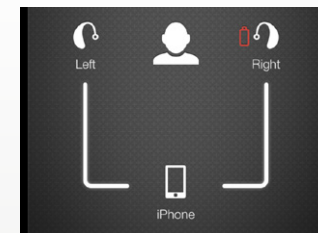

8. **Finder:** Possibilità di localizzare gli apparecchi acustici persi o smarriti

9. **Preferiti:** Per avere una visione d'insieme, modificare o cancellare i Preferiti salvati

10. **Tutorial:** Il tutorial dell'applicazione vi illustrerà le funzioni dell'app

11. **Impostazioni:** Per modificare e personalizzare i nomi dei programmi, cancellare tutti i preferiti, accedere e uscire dalla modalità demo e vedere le informazioni di base sull'app

Avvertenze e precauzioni

Uso con le app per dispositivi mobili:

Si consiglia all'utente di non disattivare le notifiche degli aggiornamenti e di installarli tutti, in modo che l'applicazione funzioni correttamente e sia puntualmente aggiornata.

Usare l'applicazione solo con i dispositivi per i quali è stata ideata, come indicato nel manuale d'uso dell'apparecchio acustico.

GN Hearing non si ritiene responsabile per l'uso dell'app con altri dispositivi.

Avvertenze e precauzioni

Se si utilizza l'app con l'apparecchio acustico, leggere il manuale d'uso dell'apparecchio. Il manuale d'uso è incluso nella confezione. Se vi serve una copia aggiornata del manuale, rivolgetevi al servizio clienti di GN.

Prestare attenzione alle informazioni contrassegnate dai simboli di avvertenza



ATTENZIONE indica una situazione che può comportare lesioni gravi,

PRUDENZA indica una situazione che può comportare lesioni di lieve entità o poco gravi.

Destinazione d'uso delle applicazioni per smartphone:

Le app sono progettate per essere usate con gli apparecchi acustici e controllarne la funzionalità; inoltre, offrono all'utente opzioni supplementari per la regolazione dei parametri acustici e importanti funzionalità extra.

L'applicazione GN Hearing per dispositivi mobili è ideata per essere utilizzata con gli apparecchi acustici wireless Bluetooth Smart. L'applicazione GN Hearing per dispositivi mobili invia e riceve segnali dagli apparecchi acustici wireless Bluetooth Smart e tramite i dispositivi per i quali sono state sviluppate.



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark

Per qualsiasi questione relativa alla direttiva 93/42/CEE in materia di apparecchiature mediche, rivolgersi direttamente a GN Hearing A/S

GN Hearing

Sede Italia

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com
CVR no. 55082715

Italia

GN Hearing
Via Nino Bixio, 1/B
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel.: +39 049 8911 511
Fax: +39 049 8911 450
info@gnhearing.it
www.resounditalia.com

Svizzera

GN Hearing
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tel.: +41 44 722 91 11
Fax: +41 44 722 91 12
info@gnresound.ch
www.resound.ch