

GN Hearing app – brugsanvisning

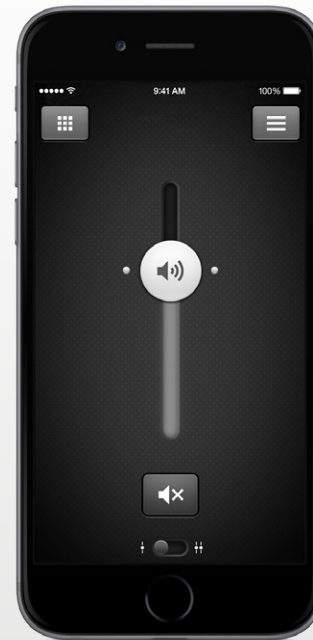

Introduktion

Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater.

Vores innovative lydteknologi og design i kombination med den tilpassede programmering af apparatet, som din høreapparatspecialist har valgt, gør din høreelse til en langt mere behagelig oplevelse.

Appen hjælper dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater ved at give dig nye måder til at få kontrol, personlig tilpasning og lindring.

Hvis du vil have en trykt version af brugsanvisningen til denne app, kan du kontakte kundesupport eller udskrive denne brugsanvisning.

Sådan finder og installerer du appen




Få adgang til apps til iPhone, iPad og iPod touch – download i Apple App Store ved at benytte denne fremgangsmåde:

1. Åbn App Store ved at trykke på App Store ikonet på  en iPhone, iPad eller iPod touch.
2. Søg efter "GN Hearing" og navnet på appen i App Store.
3. Hvis du bruger en iPad, skal du ændre søgekriterierne i det øverste venstre hjørne til "kun iPhone".
4. Når du har fundet appen, skal du trykke på "Hent".
5. Tryk derefter på "Installer".
6. Indtast et gyldigt Apple-id og en gyldig adgangskode.
7. Når du har indtastet adgangskoden, downloades og installeres GN Hearing appen.
8. Efter download kan du finde appen på mobilenheden – tryk for at åbne appen.



Få adgang til apps til Android enheder – download i Google Play ved at benytte denne fremgangsmåde:

1. Åbn Play ved at trykke på Play Store ikonet  på din Android telefon.
2. Søg efter "GN Hearing" og navnet på appen på Google Play.
3. Når du har fundet appen, skal du trykke på "Installer" og derefter "Accepter" for at tillade, at appen får adgang til bestemte funktioner på din telefon, f.eks. Bluetooth.
4. Når du har indtastet adgangskoden, downloades og installeres GN Hearing appen.
5. Når installationen er fuldført, skal du trykke på "Åbn" for at åbne appen.

Påkrævede enheder

Appen giver dig grundlæggende funktioner, så du har dem lige ved hånden og kan tilpasse din lytteoplevelse til lige præcis dine behov.

Du skal bruge følgende enheder for at kunne bruge appen:

iOS mobilenhed

1. Høreapparater, der bruger Made for iPhone eller Bluetooth Smart teknologi¹
2. Mobilenhed: iPhone, iPad eller iPod touch, der kører iOS 8 eller nyere.
Appen understøtter Apple Watch. Understøttelse af Watch kræver watchOS 2 og iOS 9.


Android mobilenhed

1. Høreapparater, der bruger Made for iPhone eller Bluetooth Smart teknologi¹
2. Appen er kompatibel med understøttede Android mobilenheder², der kører OS 4.4.2 KitKat eller nyere.

¹ Sørg for, at høreapparaterne er opdaterede med den sidste nye firmwareversion. Din høreapparatspecialist kan opdatere firmvaren i høreapparaterne for dig.

² Se websiden for appen for at få en liste over kompatible Android enheder www.userguides.gnhearing.com

Funktionalitet i appen

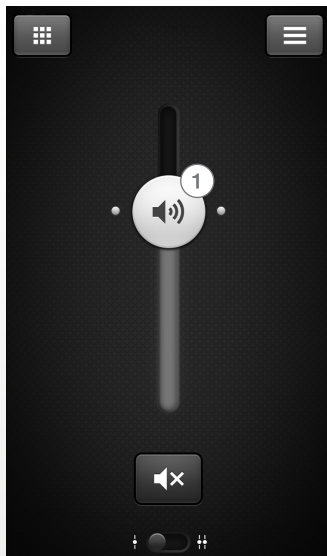

1. Juster og dæmp lydstyrken for begge høreapparater eller for det enkelte høreapparat.



2. Skift manuelle programmer og **streamingprogrammer**.

3. Juster **diskant og bas**, så de passer til dine præferencer.

4. Opret **Favoritter** for at gemme foretrukne programmer og indstillinger. Knyt en bestemt Favorit til en bestemt placering.


5. Brug **Sound enhancer** til at foretage avancerede funktionsjusteringer: Komfort i støj, talefokus og komfort i vind*.

6. Brug **Tinnitus manager** til at justere tonehøjden og variationen af lyden fra Tinnitus lydgenerator.**


Brug Tinnitus manager til at vælge din foretrukne Nature Sound™**

*Fås til Bluetooth Smart høreapparater i den højeste prisklasse: 8,9,17

**Tilgængelige, hvis Tinnitus lydgenerator er blevet aktiveret i høreapparaterne.

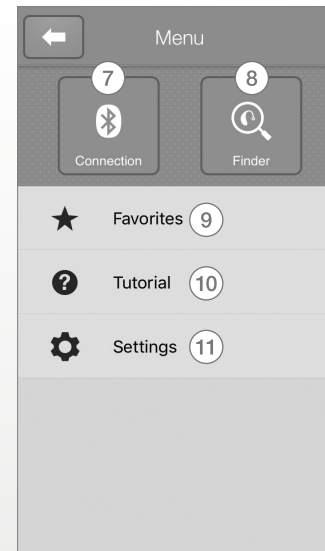

7. **Forbindelse:** Se forbindelsesstatus og sdvarselsindikator for lavt batteri.

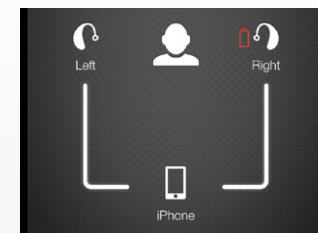

8. **Finder:** Få hjælp til at finde høreapparater, du har tabt eller forlagt.

9. **Favorites:** Se en oversigt over eller rediger eller slet gemte favoritter.

10. **Tutorial:** Selvstudieme i appen guider dig gennem appens funktioner.

11. **Settings:** Rediger og tilpas programnavne, slet alle favoritter, åbn og afslut demotilstand, og se baggrundsplysninger om appen.

Advarsler og forholdsregler

Brug sammen med apps til mobilenheder:

Underretninger om app-opdateringer bør være slået til, og det anbefales, at brugeren installerer alle opdateringer for at sikre, at appen fungerer korrekt og holdes ajour.

Appen må kun bruges sammen med de høreapparater, som den er tiltænkt, og som beskrevet i brugsanvisningen til høreapparatet.

GN Hearing fralægger sig ethvert ansvar, hvis appen bruges sammen med andre enheder.

Advarsler og forholdsregler

Hvis du bruger appen sammen med høreapparatet, skal du sørge for at læse brugsanvisningen til høreapparatet. Brugsanvisningen til høreapparatet fulgte med æsken til høreapparatet. Hvis du har brug for et nyt eksemplar, skal du kontakte GN Hearings kundeservice.

Vær opmærksom på oplysninger markeret med advarselssymbol



ADVARSEL angiver en situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser

FORSIGTIG angiver en situation, der kan føre til mindre og moderate skader.

Tilsligtet brug af smartphone apps:

Appene er beregnet til brug sammen med høreapparaterne til at kunne styre høreapparatfunktionalitet og give slutbrugeren ekstra muligheder for at justere høreparametre samt ekstra, relevante funktioner.

GN Hearings app til brug sammen med mobilenheder er beregnet til brug sammen med trådløse Bluetooth Smart høreapparater. GN Hearing apps til mobilenheder sender og modtager signaler fra trådløse Bluetooth Smart høreapparater via de mobilenheder, som appene er udviklet til.



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark

Problemer i forbindelse med EU's direktiv for medicinsk udstyr 93/42/EØF bedes videresendes til GN Hearing A/S.

GN Hearing

Internationalt hovedkontor**GN Hearing Danmark A/S**

Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

CVR no. 55082715

© 2015, 2016 GN Hearing A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google Inc. Bluetooth ordmærket og logoer er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Samsung, Galaxy og Galaxy S5 er varemærker, der tilhører Samsung Electronics Co. Ltd.