

GN Hearing app - bruksanvisning

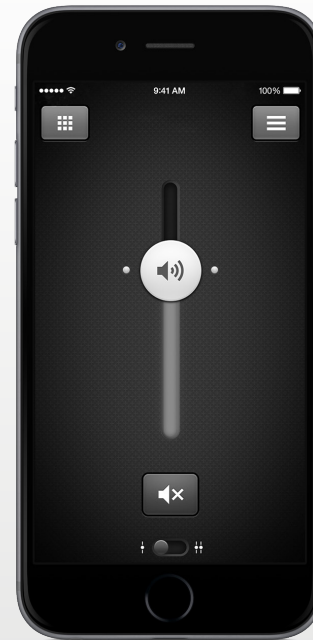

Introduktion

Appen är utvecklad för att förbättra hörupplevelsen och hjälper dig att få ut mer av dina hörapparater.

Vår innovativa teknik och design kombinerat med inställningarna som din audionom har gjort gör din hörupplevelse ännu angenämare.

Med appen får du ut mer av dina hörapparater och nya sätt att kontrollera och anpassa dem.

Om du behöver en utskriven version av bruksanvisningen för appen ska du kontakta kundtjänst eller helt enkelt skriva ut den här bruksanvisningen.

Söka efter och installera appen




Ladda ner appar för iPhone, iPad och iPod touch – följ stegen nedan för att ladda ner från Apple App Store:

1. Gå till App Store genom att trycka på App Store-ikonen  på en iPhone, iPad eller iPod touch
2. Sök efter "GN Hearing" och appens namn i App Store
3. Om du använder en iPad ändrar du sökkriterierna i det övre vänstra hörnet till "endast iPhone"
4. När du har hittat önskad app trycker du på "Hämta"
5. Tryck sedan på "Installera"
6. Ange ditt Apple-ID och lösenord
7. När du har angett lösenordet kommer GN Hearing-appen att laddas ner och installeras
8. Efter nedladdning syns appen på mobilenhetens skärm: tryck på appen för att starta den



Ladda ner appar för Android-enheter – följ stegen nedan för att ladda ner från Google Play:

1. Gå till Play Store genom att trycka på ikonen Play Store  på din Android-mobil.
2. Sök efter "GN Hearing" och namnet på appen i Google Play
3. När du har hittat appen trycker du på "Installera" och sedan "Godkänn" för att ge appen åtkomst till vissa funktioner på din mobil, t.ex. Bluetooth
4. När du har angett lösenordet kommer GN Hearing-appen att laddas ner och installeras
5. När installationen är klar trycker du på "Öppna" för att starta appen

Enheter som krävs

Appen ger dig tillgång till både grundläggande och avancerade funktioner så att du kan skräddarsy din hörupplevelse.

Följande krävs för att använda appen:

iOS mobilenhet

1. Hörapparater med Made for iPhone-certifiering eller Bluetooth Smart-teknik¹
 2. Mobilenhet: iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8 eller senare.
- Appen stödjer Apple Watch. För Apple Watch krävs watchOS 2 och iOS 9.


Android mobilenhet

1. Hörapparater med Made for iPhone-certifiering eller Bluetooth Smart-teknik¹
2. Appen är kompatibel med mobila Android-enheter² som använder OS 4.4.2 KitKat eller senare


¹ Kontrollera att hörapparaterna har uppdaterats med senaste firmware-version. Din audionom kan hjälpa dig att uppdatera hörapparaternas firmware.

² Gå till appens webbplats för en lista över kompatibla Android-enheter: www.userguides.gnhearing.com

Appfunktioner

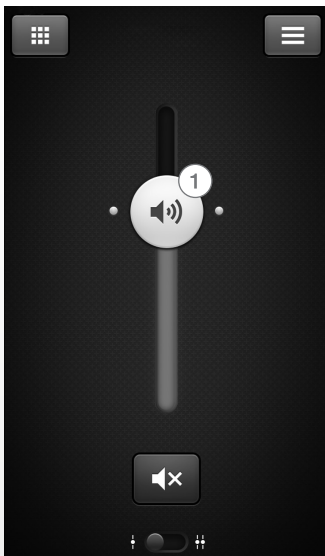


1. Justera eller stäng av volymen på båda hörselapparaterna antingen samtidigt eller individuellt

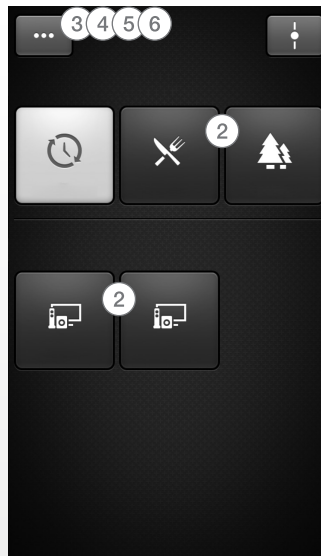


2. Ändra manuella program och **streamingprogram**
3. Gör egna inställningar för **diskant och bas**
4. Skapa **favoriter** för att spara favoritprogram och inställningar
Knyt favoriter till specifika platser
5. Använd **Sound enhancer** för avancerade ljudinställningar:
Komfort i buller, röstfokus och komfort i vindbrus*
6. Använd **Tinnitus Manager** för att justera tonläget och variationen av ljud från Tinnitus Brusgenerator**

*Finns för Bluetooth Smart hörselapparater i högre prisklasser: 8,9,17
**Finns om Tinnitus Brusgenerator har aktiverats i hörselapparaterna.

Använd Tinnitus Manager för att välja önskat Nature Sound TM**

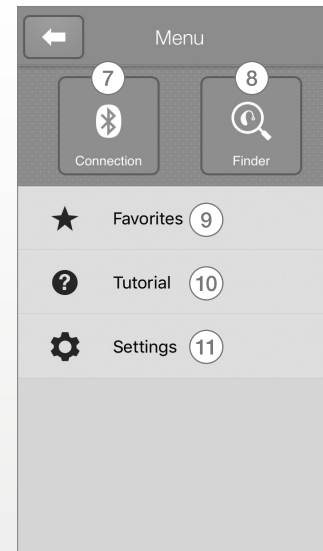

7. **Connection:** Visa anslutningsstatus och batterivarnare.

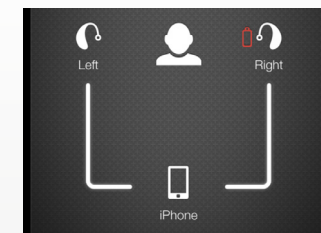

8. **Finder:** Hitta förlagda eller borttappade hörselapparater

9. **Favorites:** Visa en översikt, redigera eller ta bort sparade favoriter

10. **Tutorial:** Den inbyggda guiden förklarar appens funktioner

11. **Settings:** Redigera och anpassa programnamn, ta bort favoriter, prova och avsluta demoläget och visa bakgrundsinformation om appen

Varningar och försiktighetsåtgärder

Användning med mobilappar:

Meddelanden om uppdateringar ska inte inaktiveras och vi rekommenderar att du installerar alla uppdateringar för att säkerställa att appen fungerar korrekt och är uppdaterad.

Appen ska enbart användas med hörapparaterna som den är avsedd för enligt hörapparaternas bruksanvisning.

GN Hearing åtar sig inget ansvar om appen används med andra apparater.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Om du använder appen med hörapparaten bör du läsa hörapparatens bruksanvisning.

Bruksanvisningen medföljde i hörapparaternas förpackning. Om du behöver en ny bruksanvisning ska du kontakta GN Hearing kundtjänst.

Var uppmärksam på information märkt enligt nedan



WARNING indikerar situationer som kan leda till allvarliga skador, **OBS** visar information om situationer som kan leda till mindre eller måttliga skador.

Avsedd användning av smartphone-appar:

Apparna är avsedda för användning tillsammans med hörapparater för att styra deras funktioner och ge brukaren möjlighet att justera inställningar och få tillgång till utökad funktionalitet.

GN Hearing mobilanslutningsapp är endast avsedd att användas med Bluetooth Smart trådlösa hörapparater. GN Hearing mobilanslutningsapp sänder och tar emot signaler från Bluetooth Smart trådlösa hörapparater via mobila enheter för vilka apparna är utvecklade.



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danmark
Danmark

Frågor som rör EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EG ska ställas direkt till GN Hearing A/S

GN Hearing

GLOBALT HUVUDKONTOR

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danmark
Danmark
Tel. +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

Sverige

GN Hearing
Box 11034
404 21 Göteborg
Tel: +46 31 800 150
info-se@gnhearing.com
www.gnresound.se

Finland

GN Hearing
PL7 (Koronakatu 1B)
FIN-02211 Espoo, Finland
Puh.: +358 9 4777 9700
kuulo@gnresound.com
www.gnresound.fi

CVR nr 55082715

© 2015, 2016 GN Hearing A/S. Med ensamrätt. Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad, iPod touch och Apple Watch är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder. App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc. Bluetooth word-märket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Samsung, Galaxy och Galaxy S5 är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co. remove