

GN Hearing -sovellus

- käyttöohje

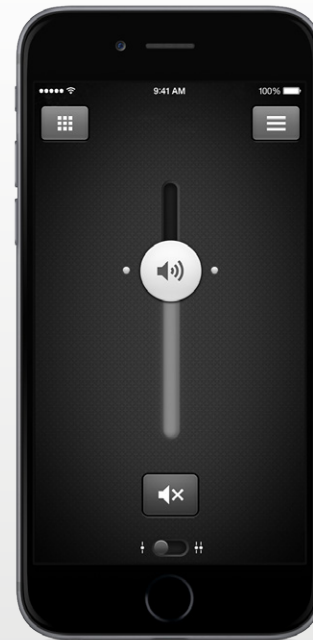

Johdanto

Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti.

Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä ammattitaitoiseen sovitukseen takaavat parhaan mahdollisen äänikokemuksen.


Tämä sovellus auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti, koska niitä voi hallita ja mukauttaa sekä käyttää lievittämiseen täysin uudella tavalla.

Saat sovelluksen painetun käyttöohjeen ottamalla yhteyden asiakaspalveluun tai tulostamalla tämän käyttöohjeen.

Sovelluksen paikantaminen ja asentaminen




Voit ladata iPhone-, iPad- ja iPod touch -sovelluksen Applen App Store -palvelusta toimimalla seuraavasti:

1. Siirry App Storeen napauttamalla iPhonessa, iPadis  tai iPod touchissa näkyvää App Store -kuvaketta.
2. Kirjoita App Storessa hakusanoiksi GN Hearing ja sovelluksen nimi.
3. Jos käytät iPadia, vaihda vasemmassa yläkulmassa hakuehdoksi "iPhone only".
4. Kun olet paikantanut sovelluksen, napauta Hae-painiketta.
5. Napauta tämän jälkeen Asenna-painiketta.
6. Kirjoita voimassa oleva Apple-tunnus ja salasana.
7. Kun olet kirjoittanut salasanan, GN Hearing -sovellus ladataan ja asennetaan.
8. Kun sovellus on ladattu ja asennettu, käynnistä se napauttamalla sitä.



Voit ladata sovelluksen Android-laitteeseen Google Play -palvelusta toimimalla seuraavasti:

1. Siirry Play Storeen napauttamalla Android-puhelimessa näkyvää Play Store -kuvaketta  .
2. Kirjoita Google Play -palvelussa hakusanaksi GN Hearing ja sovelluksen nimi.
3. Kun olet paikantanut sovelluksen, napauta Asenna-painiketta. Salli esimerkiksi Bluetooth-toiminnon käyttäminen napauttamalla Hyväksy-painiketta.
4. Kun olet kirjoittanut salasanan, GN Hearing -sovellus ladataan ja asennetaan.
5. Kun asennus on valmis, käynnistä sovellus napauttamalla Open (Avaa) -painiketta.

Laitevaatimukset

Sovellus antaa käyttöön perus- ja lisätoimintoja, jotta voit mukauttaa kuuntelu-elämäyksesi.

Sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia laitteita:

iOS-mobiililaite

1. Made for iPhone- tai Bluetooth Smart -yhteensopivat kuulokojeet¹
2. Mobiililaite: iPhone, iPad tai iPod touch, jossa on iOS 8 tai uudempi. Sovellus on Apple Watch -yhteensopiva. Watch-tuki edellyttää watchOS 2- ja iOS 9 -versioita.


Android-mobiililaite

1. Made for iPhone- tai Bluetooth Smart -yhteensopivat kuulokojeet¹
2. Sovellus on yhteensopiva tuettujen Android-mobiililaitteiden² kanssa, joissa on OS 4.4.2 KitKat tai uudempi.


¹ Varmista, että kuulokojeisiin on päivitetty uusin laiteohjelmistoversio. Muussa tapauksessa audionomi voi päivittää ne.

² Tutustu sovelluksen sivustossa luetteluun yhteensopivista Android-laitteista: www.userguides.gnhearing.com

Sovelluksen toiminnot

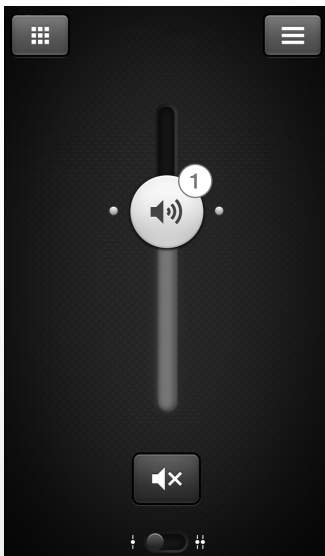

1. Molempien kuulokojeiden tai toisen kuulokojeen äänenvoimakkuuden säätäminen yksilöllisesti ja mykistäminen

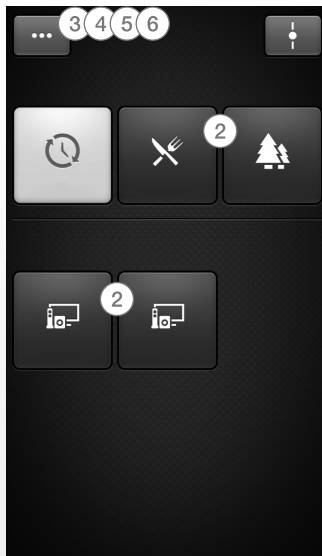

2. Käsisäätöisten ja lähetysohjelmien vaihtaminen

3. Äänensävyn säätäminen mieleiseksi

4. Suosikkien luominen ja tallentaminen (haluamasi ohjelmat ja asetukset) Suosikin yhdistäminen tiettyyn sijaintiin


5. Äänenparannustoiminnon käyttäminen edistyneellä tavalla: Mukavampi melussa, Puheeseen keskittyminen ja Mukavampi tuulessa**

6. Tinnituksen hallinnan avulla voidaan säätää tinnitusmaskerin** tuottaman äänen korkeutta ja vaihtelua.


Tinnituksen hallinnan avulla voidaan valita haluttu Nature Sound™** -luonnonääni.

*Käytettävissä seuraavien tekniikkatasojen Bluetooth Smart -kuulokojeissa: 8, 9 ja 17

**Käytettävissä, jos kuulokojeissa on otettu käyttöön tinnitusmaskeri.

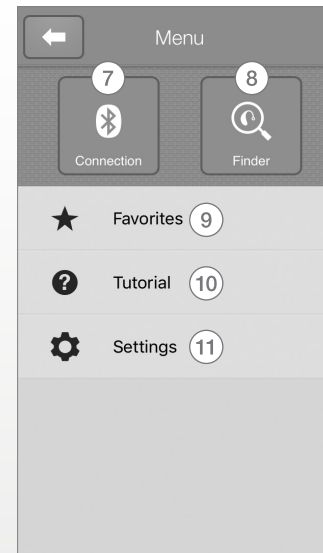

7. **Yhdistäminen:** Näet yhteyden tilan ja varoituksen pariston tyhjenemisestä.

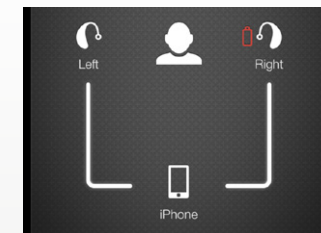

8. **Etsimistoiminto:** Auttaa löytämään kadonneet tai väärin paikkoihin jätetut kuulokojeet

9. **Suosikit:** Näet yleiskatsauksen suosikeista ja voit muokata tai poistaa tallennettuja suosikkeja

10. **Opetusohjelma:** Sovelluksen opetusohjelma kertoo toiminnoista.

11. **Asetukset:** Voit muokata ja mukauttaa ohjelmien nimiä, poistaa kaikki suosikit, siirtyä esittelytilaan ja poistua siitä sekä tarkastella sovelluksen tietoja.

Varoitukset ja varotoimet

Käyttäminen yhdessä mobiililaitesovellusten kanssa:

Sovelluksen päivitysilmoituksia ei saa poistaa käytöstä. On suositeltavaa asentaa kaikki päivitykset, jotta sovellus toimii oikein ja pysyy ajan tasalla.

Sovellusta saa käyttää vain kuulokojeissa, joihin se on tarkoitettu. Lisätietoja on kuulokojeen käyttöohjeissa. GN Hearing ei ole vastuussa seurauksista, jos sovellusta käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa.

Varoitukset ja huomautukset

Jos käytät sovellusta yhdessä kuulokojeen kanssa, lue kuulokojeen käyttöohje. Kuulokojeen käyttöohje sisältyy sen pakkaukseen. Voit pyytää sen GN Hearingin asiakastuesta.

Huomaa varoitusmerkillä merkityt tiedot.



VAROITUS osoittaa tilannetta, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

HUOMIO osoittaa tilannetta, joka voi johtaa lieviin ja keski-suuriin henkilövahinkoihin.

Älypuhelinsovellusten käyttötarkoitus:

Sovellukset on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä kuulokojeiden kanssa. Niiden avulla hallitaan kuulokojeiden toimintoja ja parametreja sekä saadaan käyttöön lisätoimintoja.

GN Hearing -mobiililaitesovellus on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä langattomien Bluetooth Smart -kuulokojeiden kanssa. GN Hearing -mobiililaitesovellus lähettää signaaleja yhteensopiviin langattomiin Bluetooth Smart -kuulokojeisiin ja vastaanottaa signaaleja niistä.



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark

Kaikista EU:n lääkinnällisten laitteiden direktiiviä 93/42/ETY koskevista ongelmista tulee ilmoittaa GN Hearing A/S -yhtiölle.

GN Hearing

MAAILMANLAAJUINEN PÄÄKONTTORI

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Tanska
Puh: +45 4575 1111
Faksi: +45 4575 1119
www.resound.com
Y-tunnus 55082715

SUOMI

GN Hearing
PL 7 (Koronakatu 1B)
FIN-02211 Espoo
Puh: (09) 4777 9700
Faksi: (09) 4777 9777
kuulo@gnresound.com
www.gnresound.fi