
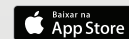


---

# Aplicativo GN Hearing

## - manual do usuário

---

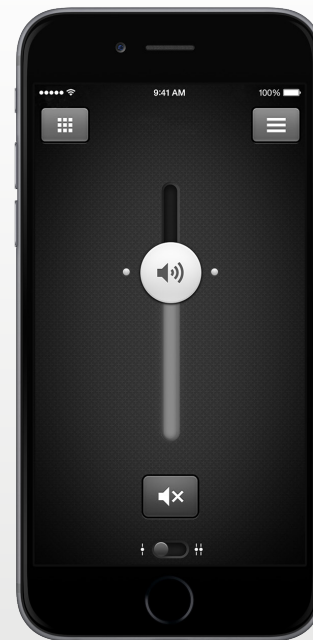

# Apresentação

**O aplicativo foi desenvolvido para aprimorar a sua experiência auditiva e permitir que você aproveite melhor os seus aparelhos auditivos.**

Nossos inovadores design e tecnologia de som, combinados a uma programação personalizada do dispositivo feita por seu audiologista, tornarão a audição uma experiência mais agradável.


O aplicativo permite que você aproveite melhor os seus aparelhos auditivos, oferecendo novas maneiras de obter controle, personalização e alívio.

Para obter uma versão impressa do manual do usuário do aplicativo, contate o suporte ao cliente ou simplesmente imprima este manual.

# Como localizar e instalar o aplicativo




## **Aplicativos de acesso para iPhone, iPad e iPod touch – faça o download na Apple App Store seguindo este procedimento:**

1. Entre na App Store clicando no ícone da App Store  no iPhone, iPad ou iPod touch
2. Na App Store, pesquise por “GN Hearing” e pelo nome do aplicativo
3. Se estiver usando o iPad, altere o critério de busca no canto superior esquerdo para "iPhone only"
4. Após achar o aplicativo, clique em "Obter"
5. Em seguida, clique em "Instalar"
6. Insira um ID e senha Apple válidos
7. Após inserir a senha, o aplicativo GN Hearing será baixado e instalado
8. Após o download, você poderá encontrar o aplicativo na tela do dispositivo móvel – toque para abrir o aplicativo



## **Aplicativos de acesso para dispositivos Android – faça download na Google Play seguindo este procedimento:**

1. Entre na Play Store tocando no ícone Play Store  em seu telefone Android.
2. No Google Play, pesquise por "GN Hearing" e pelo nome do aplicativo
3. Ao encontrar o aplicativo, toque em "Instalar", seguido de "Aceitar", para permitir que o aplicativo acesse determinados recursos do seu telefone, como o Bluetooth
4. Após inserir a senha, o aplicativo GN Hearing será baixado e instalado
5. Ao fim da instalação, toque em "Abrir" para abrir o aplicativo

# Acessórios requeridos

O aplicativo lhe disponibiliza controles básicos e mais recursos avançados para que você personalize a sua experiência auditiva.

Para usar o aplicativo, você precisa dos seguintes dispositivos:

## **Dispositivo móvel iOS**

1. Aparelhos auditivos que utilizam a tecnologia Made for iPhone ou Bluetooth Smart<sup>1</sup>
2. Dispositivo móvel: iPhone, iPad ou iPod touch com iOS 8 ou superior.

O aplicativo é compatível com o Apple Watch. O suporte ao Watch requer o watchOS 2 e iOS 9.


## **Dispositivo móvel Android**

1. Aparelhos auditivos que utilizam a tecnologia Made for iPhone ou Bluetooth Smart<sup>1</sup>
2. O aplicativo é compatível com os dispositivos móveis Android<sup>2</sup> que possuam o OS 4.4.2 KitKat ou versão mais recente


<sup>1</sup> Assegure-se de que os aparelhos auditivos estão atualizados com a última versão de firmware. Caso contrário, seu audiologista poderá atualizá-lo para você.

<sup>2</sup> Consulte o site do aplicativo para obter uma lista de dispositivos Android compatíveis em [www.userguides.gnhearing.com](http://www.userguides.gnhearing.com)

# Funcionalidade do aplicativo

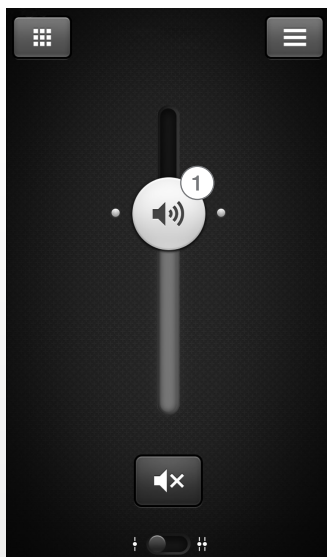

1. Ajuste e silencie o volume para os dois aparelhos auditivos ou para cada aparelho separadamente

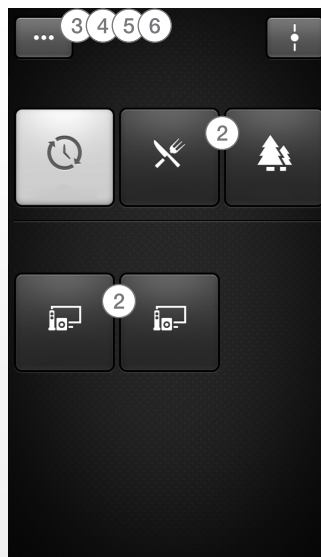

2. Mude programas manuais e do **transmissor**

3. Ajuste **graves e agudos** como lhe agradar

4. Crie **Favoritos** para salvar o programa e as configurações preferidas  
Associe um Favorito a uma localidade específica


5. Use o **Otimizador Sonoro** para ajustes avançados dos recursos: conforto em ambientes ruidosos, foco na fala e conforto com vento\*

6. Use o **Gerenciador de Zumbido** para ajustar o tom e a variação do som do Gerador de Som para Zumbido\*\*


Use o Gerenciador de Zumbido para escolher os seus sons da natureza prediletos com o Nature Sound <sup>TM</sup>\*\*

\*Disponível para aparelhos auditivos com a tecnologia Bluetooth Smart nas faixas de preço mais altas: 8,9,17

\*\*Disponível se o Gerador de Som para Zumbido estiver habilitado em seus aparelhos auditivos.

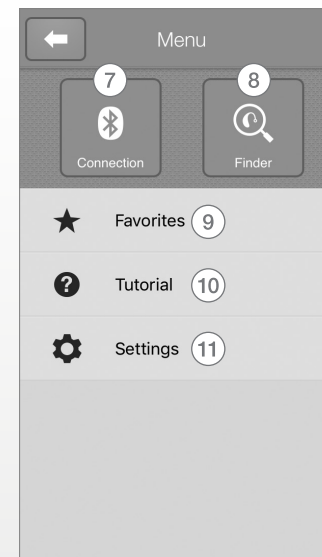

7. **Conexão:** ver o status da conexão e o aviso de bateria baixa.

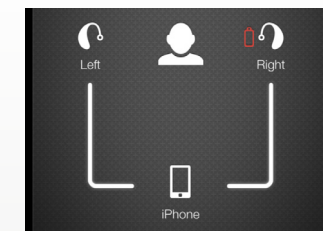

8. **Procurar:** ajuda a localizar os aparelhos auditivos que foram perdidos

9. **Favoritos:** visualize, edite ou apague os Favoritos salvos

10. **Tutorial:** o tutorial contido no aplicativo lhe ensina a usar os recursos

11. **Configurações:** edite e personalize nomes de programas, apague favoritos, entre e saia do modo de demonstração e veja informações sobre o aplicativo

# Avisos e precauções

## **Uso com aplicativos de dispositivos móveis:**

As notificações de atualizações de aplicativos não devem ser desativadas. Recomenda-se ainda que o usuário instale todas as atualizações para garantir que o aplicativo funcione corretamente e permaneça atualizado.

O aplicativo só deve ser usado com aparelhos auditivos para os quais foi concebido, conforme descrito no manual do usuário do aparelho auditivo em questão.

A GN Hearing não se responsabiliza pelo uso do aplicativo com outros dispositivos.

## **Avisos e precauções**

Se for usar o aplicativo com o aparelho auditivo, leia primeiro o manual do usuário do aparelho auditivo. O manual do usuário acompanha o aparelho auditivo.

Se precisar de outra cópia, consulte o atendimento ao cliente da GN Hearing.

Esteja ciente das informações assinaladas com um símbolo de advertência



**ADVERTÊNCIA** indica uma situação que pode causar lesões graves.

**ATENÇÃO** indica uma situação que pode causar lesões menores e moderadas.

**Finalidade do uso de aplicativos para smartphone:**

Os aplicativos foram desenvolvidos para serem usados com os aparelhos auditivos para controlar sua funcionalidade e fornecer ao usuário final opções adicionais de ajuste de parâmetros de audição, bem como oferecer recursos extras relevantes.

Os aplicativos conectados a dispositivos móveis GN Hearing foram criados para ser usados com aparelhos auditivos sem fio com a tecnologia Bluetooth Smart. Os aplicativos de dispositivos móveis GN Hearing enviam e



recebem sinais de aparelhos auditivos sem fio com a tecnologia Bluetooth Smart por meio dos smartphones para os quais foram desenvolvidos.

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Denmark

Em caso de dúvidas em relação à Diretriz de Equipamentos Médicos EU 93/42/EEC, entrar em contato com a GN Hearing A/S.

# GN Hearing

**Sede internacional**

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup, Dinamarca  
Tel.: +45 45 75 11 11  
Fax: +45 45 75 11 19  
**www.resound.com**  
N°. CVR 55082715

**Brasil**

GN Hearing  
Rua do Paraíso, 139 - 6º, 7º, 8º e 9º andares  
CEP: 04103-000 São Paulo  
Tel.: +55 11 3016 8350  
Fax: +55 11 3016 8363  
**www.resound.com.br**  
E-mail: tecnovigilancia@gnresound.br

**Spain**

GN Hearing  
Parque Empresarial Prado Overa  
c/ Puerto de la Morcuera, 14-16  
28919 Leganés (Madrid)  
Tel.: +34 91 428 22 30  
Fax: +34 91 428 22 31