



Brugsanvisning til app

# Introduktion

**Appene er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater.**

Vores innovative lydteknologi og design i kombination med den tilpassede programmering af apparatet, som din høreapparatspecialist har valgt, gør din hørelse til en langt mere behagelig oplevelse.

Appene hjælper dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater ved at give dig nye måder til at få kontrol, personlig tilpasning og lindring.

Du kan få flere oplysninger og hjælp til appene på vores hjemmeside:

**[www.userguides.gnhearing.com](http://www.userguides.gnhearing.com)**

Hvis du vil have en trykt version af brugsanvisningen til appen, kan du kontakte kundesupport eller udskrive denne brugsanvisning.

# Sådan finder og installerer du appen




## Få adgang til apps til iPhone, iPad og iPod touch – download i App Store ved at benytte denne fremgangsmåde:

1. Åbn App Store ved at trykke på App Store ikonet  på en iPhone, iPad eller iPod touch.
2. Søg efter navnet på appen i App Store.
3. Hvis du bruger en iPad, skal du ændre søgekriterierne i det øverste venstre hjørne til "kun iPhone".
4. Når du har fundet appen, skal du trykke på "Hent".
5. Tryk derefter på "Installer".
6. Indtast et gyldigt Apple-id og en gyldig adgangskode.
7. Når du har indtastet adgangskoden, downloades og installeres appen.
8. Efter download kan du finde appen på mobilenheden – tryk for at åbne appen.



## Få adgang til apps til Android enheder – download i Google Play ved at benytte denne fremgangsmåde:

1. Åbn Google Play ved at trykke på Play Store ikonet  på din Android telefon.
2. Søg efter navnet på appen på Google Play
3. Når du har fundet appen, skal du trykke på "Installer" og derefter "Accepter" for at tillade, at appen får adgang til bestemte funktioner på din telefon, f.eks. Bluetooth.
4. Når du har indtastet adgangskoden, downloades og installeres appen.
5. Når installationen er fuldført, skal du trykke på "Åbn" for at åbne appen.

# BeMore app



Med BeMore appen kan du betjene og tilpasse indstillingerne for dine høreapparater direkte fra din mobilenhed, så du kan tilpasse din høreoplevelse, så den passer til dine lydmiljøer. Du kan også få opdateret dine høreapparatprogrammer af din høreapparatspecialist og få fjernopdateret dine høreapparater uden at skulle besøge klinikken (fås på udvalgte markeder). Du bliver vejledt i appen om de ting, du kan foretage dig, og hvordan du gør det.

BeMore appen fås i App Store og Google Play.

## Du skal bruge følgende enheder for at kunne bruge appen:


*Mobilenheder:*

- iPhone, iPad eller iPod touch. Appen er også kompatibel med Apple Watch.
- Understøttede Android enheder.

Besøg vores hjemmeside for at få oplysninger om kompatibilitet og en opdateret liste med kompatible mobilenheder: [www.userguides.gnhearing.com](http://www.userguides.gnhearing.com)



# Funktionalitet i BeMore appen

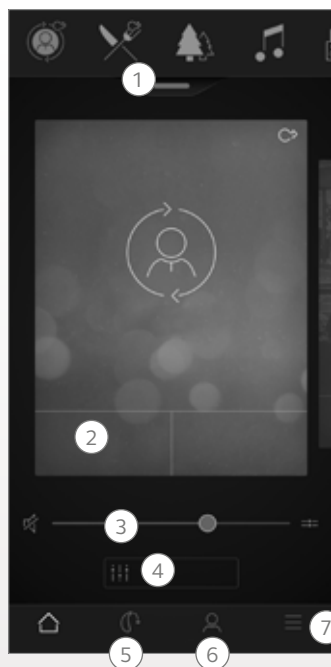

Hovedskærm:

1. Benyt topkarrusellen, **rullemenuen** eller et kortswipe til at vælge program for høreapparat eller streamer eller en favorit. Tryk på rullemenuen for at redigere programmer og favoritter.

2. Brug **genvejstaster** til avancerede lydjusteringer med ét tryk.

3. Juster **lydstyrken**, eller slå lyden fra.

4. Få adgang til **Sound Enhancer** for at justere diskant/mellem/bas, støjreduktion, talefokus eller vindstøjreduktion\*. Du kan også få adgang til Tinnitus Manager for at justere tonelejet og variationen af lyde fra Tinnitus lydgenerator eller vælge en Nature Sound\*\*.

5. **Navigationsmenu.**

6. Menuen "**Mit**":

Her kan du få **mere** at vide om, hvad appen **kan og kontakte din høreapparatspecialist\*** for at anmode om hjælp og modtage opdateringer til dine høreapparater.

7. Menuen "**Mere**":

Her kan du justere appindstillinger og finde ekstra oplysninger om din app.

\*Tilgængeligheden af funktionen afhænger af høreapparatmodellen og den tilpasning, din høreapparatspecialist har lavet.

\*\*Fås hvis Tinnitus lydgenerator er blevet aktiveret af din høreapparatspecialist.

## Tilset brug af apps til mobile enheder:

Apps til mobile enheder er beregnet til brug sammen med trådløse høreapparater. Apps til mobile enheder sender og modtager signaler fra trådløse høreapparater via de mobile enheder, som appene er udviklet til.

CE  
0297

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmark

Problemer i forbindelse med EU's direktiv for medicinsk udstyr 93/42/EØF bedes videregives til GN Hearing A/S.

# Tuner app



Tuner appen har den samme brugervenlige grænseflade som BeMore appen, men kan forbindes til høreapparater, der ikke understøtter Online Services.

Tuner appen fås i App Store og Google Play.

## Du skal bruge følgende enheder for at kunne bruge appen:

*Mobilenheder:*

- iPhone, iPad eller iPod touch. Appen er også kompatibel med Apple Watch.
- Understøttede Android enheder.

Besøg vores hjemmeside for at få oplysninger om kompatibilitet og en opdateret liste med kompatible mobilenheder:

**[www.userguides.gnhearing.com](http://www.userguides.gnhearing.com)**

## Tilsluttet brug af apps til mobilenheder:

Apps til mobilenheder er beregnet til brug sammen med trådløse høreapparater. Apps til mobilenheder sender og modtager signaler fra trådløse høreapparater via de mobilenheder, som appene er udviklet til.

CE  
0297

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmark

Problemer i forbindelse med EU's direktiv for medicinsk udstyr 93/42/EØF bedes videresendes til GN Hearing A/S.



# Advarsler og forholdsregler

## **Brug sammen med apps til mobilenheder:**

Underretninger om app-opdateringer bør være slået til, og det anbefales, at brugeren installerer alle opdateringer til appen og operativsystemet for at sikre den højest mulige beskyttelse mod sikkerhedsrisici.

Appen må kun bruges med de GN høreapparater, den er udviklet til. GN Hearing påtager sig intet ansvar, hvis appen bruges sammen med andre enheder, eller hvis apps fra tredjeparter bruges til at betjene GN Hearing enheder.

Anvend kun de finjusteringspakker, som du forventer at modtage, til dine høreapparater.

## **Advarsler og forholdsregler**

Hvis du bruger GN Hearing appen sammen med høreapparatet, skal du sørge for at læse brugsanvisningen til høreapparatet. Brugsanvisningen til høreapparatet fulgte med æsken til høreapparatet. Hvis du har brug for et nyt eksemplar, skal du kontakte GN Hearings kundeservice.

Vær opmærksom på oplysninger markeret med advarselssymbol



**ADVARSEL** angiver en situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser.  
**FORSIGTIG** angiver en situation, der kan føre til mindre og moderate skader.



# GN Hearing

Fabrikant i henhold til EU's direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF:

## **Internationalt Hovedkontor**

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmark  
Tlf.: +45 4575 1111  
gnhearing.com

CVR no. 55082715

## **Kundeservice og reparation**

GN Hearing Danmark A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmark  
Tel.: +45 4575 1111  
gnhearing.com

CVR-nr. 55082715

© 2019 GN Hearing A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Android, Google Play og Google Play logoet er varemærker, der tilhører Google Inc. Android robotten er reproduceret eller modificeret fra arbejde oprettet og delt af Google, og anvendes i henhold til vilkårene beskrevet i Creative Commons 3,0 Attribution License. Bluetooth ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.